

CGSPORTS
LIVE FOR IT
Máscara Comunitária Reutilizável

**MÁSCARA
COVID-19
CONFORME**

20208261 EQUILIBRIUM
25 LAVAGENS - USO GERAL (NÍVEL 3)



Nível 3 Máscaras têxteis destinadas à utilização por indivíduos no contexto da sua atividade profissional ou nas saídas autorizadas em períodos de confinamento, nomeadamente em espaços interiores com múltiplas pessoas.


Nome do fabricante: **Vedetapixel Unip. Lda** - Endereço: **Rua Horta de Bacelos Ed. Emp. Tejo R/c Esq. 2690-390 Sta Iria de Azoia - Re^{fe}: Vedeta vs5 - 20208261 - N.º lote | Mês | Ano de fabrico: 30 | Junho | 2020**
Composição das matérias-primas: **100% Algodão: 1 camada | 100% Poliéster: 1 camada**
Indicação do tamanho: **ADULTO**

● Processo de fabrico

- ▶ Máscara fabricada em instalações próprias, seguindo as medidas de higienização recomendadas fundamentais para o controlo da Covid-19, com matérias-primas certificadas, utilizando métodos mecânicos de costura.

● Instruções de uso

- ▶ Esta máscara deverá ser utilizada como complemento das medidas de proteção e higienização recomendadas e das regras de distanciamento social, fundamentais para o controlo da COVID-19. Para mais informação, consultar <https://covid19.min-saude.pt>.
- ▶ A máscara reutilizável deverá ser manuseada de forma correta. Seguem instruções recomendadas para o uso correto da máscara, de acordo com a Orientação da DGS n.º 019/2020, de 03/04/2020:
 - Higienização das mãos, com água e sabão ou com uma solução à base de álcool, antes de colocar a máscara;
 - Colocação da máscara com a face interna virada para a cara, e a face externa virada para fora;
 - Ajuste o elástico à sua face, de seguida, ajuste a extremidade rígida da máscara ao nariz, cobrindo a boca, o nariz e o queixo com a máscara, certificando que não existem espaços entre o rosto e a máscara;
 - Não se deve tocar na máscara enquanto esta estiver em utilização; caso tal aconteça, deve ser feita imediatamente higienização das mãos;
 - Recomenda-se uma utilização de cada máscara por um período máximo de 4h por dia, devendo a máscara ser substituída por uma nova no final desse período ou assim que se encontre húmida. A máscara retirada deve ser lavada antes de ser reutilizada;
 - Se acidentalmente molhar a máscara deve trocá-la por outra bem seca logo que possível. A máscara molhada deve ser lavada antes de ser reutilizada;
 - A remoção da máscara deve ser feita a partir da parte de trás (não tocando na frente da máscara), segurando nos atilhos ou elásticos;

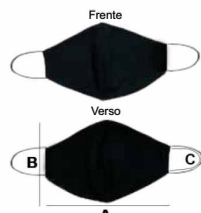

A - Largura - 25 cm B - Altura - 17 cm
C - Elástico - 15 cm

Nota Importante!

As máscaras têxteis de nível 2 e nível 3, não são enquadradas como dispositivos médicos ou como equipamentos de proteção individual.

- h) Em momento algum, a máscara deve ser guardada à volta do pescoço para ser reutilizada;
- i) A máscara deve ser colocada individualizada num saco plástico fechado, até ser colocada na máquina de lavar;
- j) Deve ser feita nova higienização das mãos, no final da utilização e manuseamento da máscara.

- ▶ A máscara deverá ser lavada antes de nova utilização, devendo cumprir o número de ciclos de lavagem indicados pelo fabricante.
- ▶ A proteção da máscara só é garantida se respeitar as instruções de limpeza e conservação que se seguem.
- ▶ A máscara deverá ser guardada em ambiente seco e resguardada de potencial contaminação (inicialmente ou após lavagem).
- ▶ A máscara deverá ser lavada antes do seu primeiro uso.
- ▶ Em caso de defeito ou dano não use a máscara, substitua por outra.
- ▶ No final do ciclo de vida da máscara, deverá lavar a máscara nas condições definidas no ponto "conservação e limpeza" e após lavagem deve ser descartada como resíduo têxtil não perigoso. Caso opte por não lavar a máscara deverá descartar como resíduo biológico.



● Conservação e limpeza

- Nº** Número máximo de ciclos de lavagem em que se garante o desempenho de proteção da máscara: **25 lavagens**
- As máscaras deverão ser lavadas usando um ciclo de lavagem normal, completo, a 60°C com detergente, após cada utilização. O utilizador terá que garantir que a máscara se encontra bem seca, antes da sua utilização.

Simbologia de Conservação e Limpeza



- Conformidade verificada através do relatório "EQUILIBRIUM n.º 20208261"

- ⚠ Remover o clipe nasal antes das lavagens.